



Návod k použití SYMFOBY BPT30D

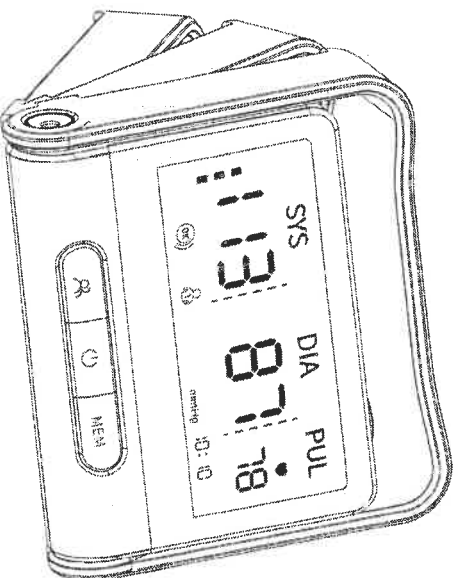

Popis zařízení

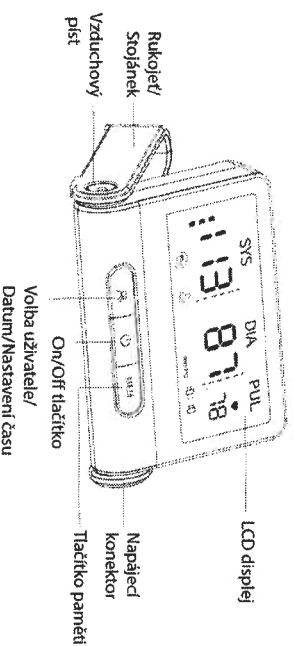

Tříbarevný displej



Zelený pro normální tlak

Oranžová pro mírně zvýšený tlak nebo hypotenzi


Červená pro vysoký tlak

Systolický Tlak (mmHg)	Diastolický Tlak (mmHg)	Barva displeje	Hierarchický vztah
≥ 160	≥ 100	červená	a (nebo)
140-159	90-99	oranžová	a (nebo)
90-139	60-89	zelená	a (nebo)
< 90	< 60	oranžová	a

! poznámka: Pokud zjistíte neočekávané hodnoty, poraďte se se svým lékařem.

Jak nastavit uživatelské skupiny?

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "R" pro vstup do rozhraní pro výběr skupiny uživatele, poté znovu stiskněte tlačítko "R" pro přepnutí a výběr skupin uživatele

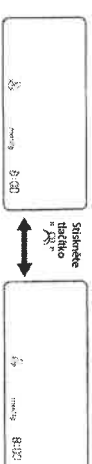



Jak nastavit "rok/měsíc/den/čas"?

V pohotovostním režimu stiskněte "R" po dobu 3 sekund pro vstup do rozhraní nastavení.

1. Když bliká „rok“, stiskněte tlačítko „MEM“ pro nastavení požadovaného roku. Stiskněte tlačítko "R" pro potvrzení a poté bude blikat "měsíc".

2. Stejným způsobem upravte „měsíc“, „datum“, „čas“.

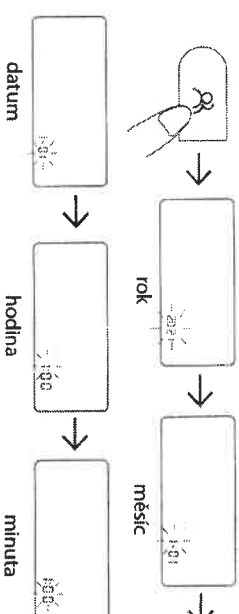


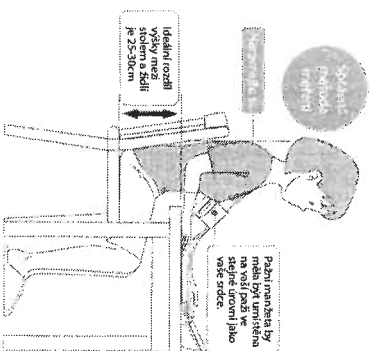

- 1) **Správné sezení**
- Chcete-li provést měření, musíte se uvolnit a pohodlně se usadit v místnosti s příjemnou teplotou. Položte ruku na stůl.
- Posaďte se do pohodlného křesla s podepřenými zády a paží.
 - Udržujte chodidla naplocho a nohy nezkřížené.
 - Pažní manžeta by měla být umístěna na vaší paži ve stejné úrovni jako vaše srdce, s paží pohodlně položenou na stole.


3) **Měření**

Začněte měřit po nasazení manžety: stiskněte tlačítko NO/OFF a monitor se začne nafukovat. Během měření se prosím nehybte ani nemluvte.

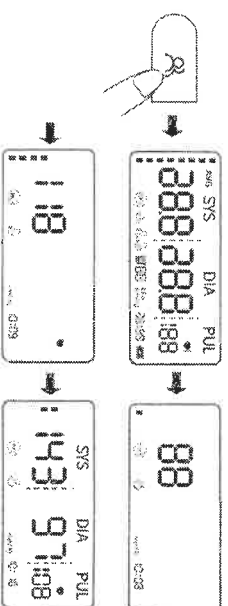

Nastavení jednotek

Výchozí hodnota je mmHg. 1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "ON/OFF" po dobu asi 10 sekund, abyste vstoupili do výběru jednotky. 2. Stiskněte "MEM" pro přeprání mmHg/KPa. Stiskněte "R" pro potvrzení výběru.

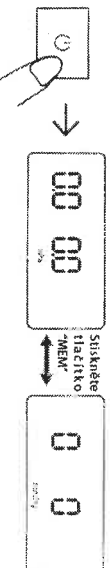

Jak zkontrolovat data v paměti?

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "MEM" a přístroj zobrazí průměrnou hodnotu měření poprvé třikrát.
2. Stiskněte znovu tlačítko "MEM" pro kontrolu 99 sad hodnot paměti jednu po druhé.

2) **Přiložení pažní manžety**

1. Odstraňte oděv na paži. Připojte manžetu k monitoru tak, že vzduchovou zástrčku bezpečně zasunete do vzduchového konektoru.
2. Protáhněte ruku poučkem manžety. Zatáhněte za manžetu, dokud nedosáhne vaší levé horní paže.

