

| ** Ohřívací a uhlíkový závad | | |
|---|--|--|
| Závada | Mojná příčina | Řešení |
| Hodiota SpO ₂ , nebo teplota se nezahrnuje normálně. | 1. Prst zaní do přístroje vložen správně. 2. Hodota SpO ₂ je pod zjištěnou mezi. | 1. Upravte polohu prstu a měřte znova. 2. Měření prováděte znovu. Je-li přesné, že přístroj nemá správne, vyhledejte místní eksperta a žádejte o diagnostiku. |
| Zobrazuje hladkou SpO ₂ , nebo teplotu není srováné | 1. Prst není umístěn v přístroji dostatečně hubotu. 2. Pacient není v klidu nebo se přist hýbe. | 1. Upravte polohu prstu a měřte znova. 2. Pacient musí být v klidu. |
| Oxyment nelze zapnout | 1. Batérie jsou téměř nebo iplné využit. 2. Batérie jsou vloženy nesprávně. 3. Přístroj je poškozen. | 1. Vyměňte batérie. 2. Vložte batérie správně. 3. Kontaktujte zákaznický servys. |
| Displej se náhle vypne | 1. Použil jsem po dobu 5 vteřin záchytu žádat signal, přístroj se automaticky přepne do poletovostního režimu. 2. Batérie jsou téměř nebo iplné využit. | 1. Nejdřív se o závadu. 2. Vyměňte batérie. |
| 10 Vysvětlivky symbolů | | |
| Symbol | Yznam | |
| | Aplikační část typu BiF | |
| | Řídí se pokyny a používejte přístroj v souladu s návodem k obsluze. | |
| | Atenci na saturaci hemoglobinu kyslíkem (%) | |
| | PR bípm | Teopová frekvence/puls (počet tepů/min) |
| Zcela využitá batéria (batérie ihned vyměňte) | | |
| | | 1. Prst není vložen. 2. Nedostatečný signál. |
| | | polaria batérie + - polaria batérie - |
| | | 1. změna ještě displej 2. vypnutí pohotovostního režimu |
| | | |
| | | |
| SN | | setové kábla |
| | | Pohledání závodové výstrahy |
| | | Likvidace podle směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních OEEZ (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) |
| IP22 | | Ochrana proti vnikuad čisticích těles $\geq 12,5\text{mm}$ a proti sklem kapající vodě. |
| | výrobce | |
| | diagram výroby | |
| | rozměry repliky pro skladování a přepravu | |